

Ally®

Tu aliado cada día

Accesorios de ostomía



# Accesorios de ostomía Ally®

## Tu aliado cada día


Cada cuerpo es diferente. También lo es cada estoma. La gama de accesorios Ally® está diseñada para permitir un cuidado aún más personalizado a cada paciente. Trabajando mano a mano con los sistemas de ostomía, los productos Ally® pueden ayudar a mantener la barrera cutánea o placa en su lugar de forma segura, reducir los problemas de fugas, proteger y cuidar la piel periestomal.

Ally® – Tu aliado cada día






4 Ally® Anillos  
Anillos para sellar, nivelar  
contorno irregular

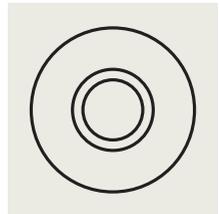

6 Ally® Tiras Extensoras de  
Fijación de Barrera  
Tiras extensoras de fijación

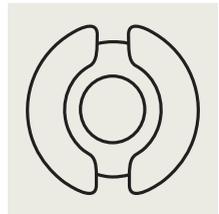

8 Ally® Pasta  
Pasta protectora para  
ostomías sin alcohol



10 Ally® Polvo  
Polvo de ostomía



# Ally® Anillos



## Ally® Anillos

Anillos para sellar y nivelar contorno irregular de las ostomías.

Los anillos Ally® están diseñados para crear una superficie más plana alrededor del estoma, rellenando cavidades y pliegues. Están destinados para prevenir la irritación, resolver las fugas y asegurar el sello.

Los anillos Ally® se recomiendan especialmente para personas que tienen hundimientos o pliegues en la piel alrededor de su estoma. Además, son una opción adicional a la pasta, en los individuos con menor destreza manual.

Espesor	Diámetro	Cantidad	Art.-No.
3 mm	48 mm	Caja de 10	2022483



# Forma de uso



Asegúrese de que la piel alrededor del estoma esté limpia y seca




Retire ambas cubiertas protectoras.


No exige mucha destreza, el material se libera con facilidad, debido a la disposición de las pestañas.



Moldee y estire el anillo de ostomía suavemente con los dedos, para darle forma más parecida a su estoma.

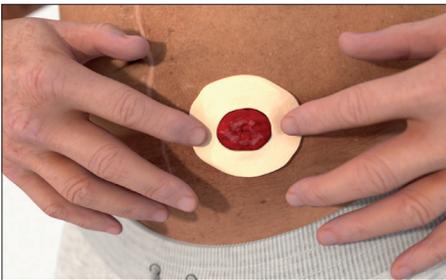

Coloque el anillo alrededor de su estoma, sobre a la piel. Alise suavemente con los dedos húmedos, incluso puede reubicar o ajustar la forma del anillo para una mejor adherencia. Por último aplane la superficie corrigiendo irregularidades.

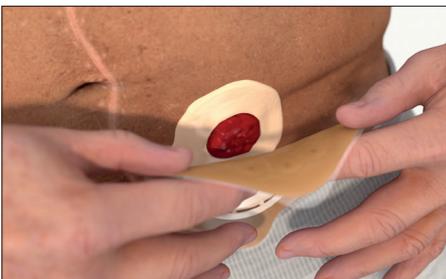

Coloque la placa o barrera de su sistema de ostomía sobre el anillo, haciendo coincidir su centro lo más posible y a su vez al contorno de su estoma. Así se asegura un buen ajuste.

Por favor lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

# Ally® Tiras Extensoras de Fijación de Barrera



## Ally® Tiras Extensoras de Fijación de Barrera

### Tiras extensoras de fijación para ostomías

Las tiras extensoras de fijación de barrera Ally® están destinados a reforzar la adhesividad y mantener la barrera cutánea o placa en su lugar firmemente, garantizando mayor seguridad para el paciente y tiempo de uso. Están diseñados para adaptarse tanto a los contornos del cuerpo como a los movimientos.

Las tiras extensoras de fijación Ally® son especialmente recomendadas a personas con estomas que tienen hernias periestomales, prolapsos, que estén mal ubicados o que en la superficie de la piel que los rodea estén presentes depresiones o prominencias óseas.

Cantidad	Radio	Art.-No.
Caja de 20	80 mm	2022300


# Forma de uso




Asegúrese de que la piel alrededor del estoma esté limpia y seca



Retire la mitad de la película protectora.

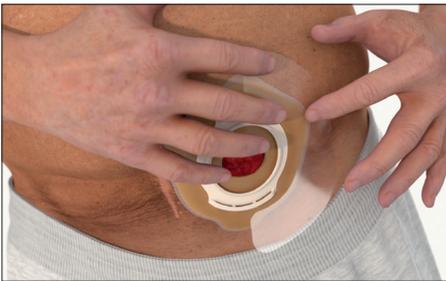

En un lado, aplique las tiras extensoras de fijación sobre la piel, superponiéndose al borde de la barrera cutánea o placa, al menos un centímetro.

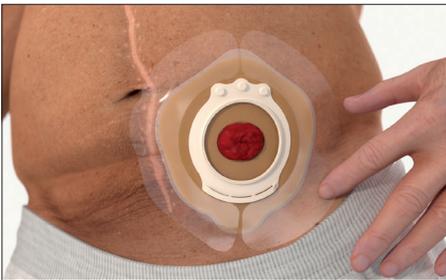

Retire la película protectora restante. Alise toda la superficie para ayudar a la adhesión. Replique las indicaciones en el lado restante.

Por favor lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

# Ally® Pasta



## Ally® Pasta

### Pasta protectora para ostomías sin alcohol

La pasta Ally® está destinada a rellenar pliegues y arrugas en la piel alrededor del estoma. Está diseñada para reducir el riesgo de fugas, proteger la piel del afluente y puede ayudar a extender el tiempo de uso de barrera cutánea o placa.

La pasta Ally® está especialmente recomendada para personas que tienen hundimientos o pliegues en la piel que rodea su estoma.

---

#### Presentación

Tubo de 80 g

---

#### Art.-No.


2022200

---


# Forma de uso




Asegúrese de que la piel alrededor del estoma esté limpia y seca

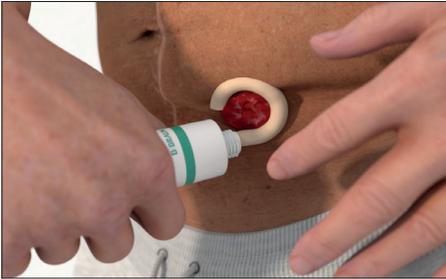

Aplicar la pasta directamente desde el tubo sobre la piel más cercana, rodeando el estoma. También puede aplicarse directamente sobre la barrera cutánea o placa. No aplique pasta en toda la superficie de la zona adhesiva.

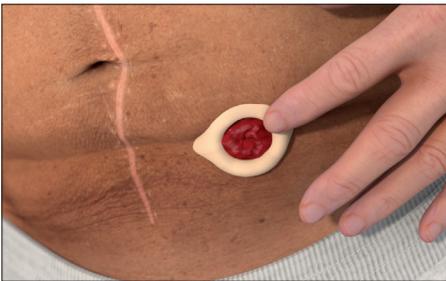

Si es necesario, alise levemente la pasta usando dedo humedecido, hisopos o pañuelos húmedos.

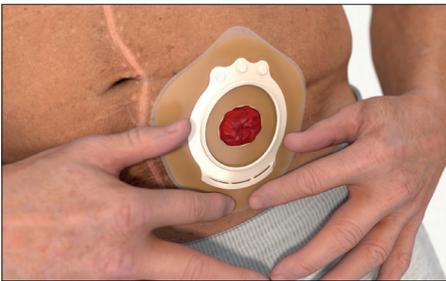

Después de colocar la barrera cutánea o placa, asegúrese de que se ajuste bien alrededor del estoma, presionándola con los dedos, especialmente alrededor del estoma. Retire la pasta residual de la boca del tubo, con un pañuelo limpio. Vuelva a tapar el tubo herméticamente para evitar el contacto con el ambiente y la humedad.



Utilice la herramienta para exprimir y vaciar el tubo.

Por favor lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

# Ally® Polvo



## Ally® Polvo

### Polvo de ostomía

Ally® Polvo está diseñado para absorber la humedad de la piel alrededor del estoma y así mantenerla seca. Está destinado a proteger la piel, reducir la irritación y permite una mejor adherencia de la barrera cutánea o placa. El polvo puede promover el procesos de curación en la piel irritada.

Se recomienda especialmente Ally® Polvo a personas con la piel que rodea el estoma enrojecida o irritada.

---

#### Presentación

Botella de 28 g

---

#### Art.-No.

2022100

---


# Forma de uso



Asegúrese de que la piel alrededor del estoma esté limpia y seca



Desenrosque la tapa, apunte la boquilla de la botella hacia la piel que necesita ser tratada. Aplique la cantidad suficiente. Siempre agitar suavemente la botella antes de aplicar, para garantizar una adecuada cantidad de polvo sobre la piel afectada.

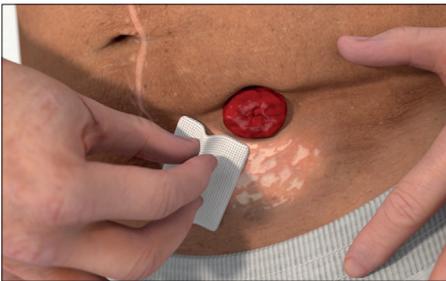

Extienda el polvo uniformemente con los dedos o pañuelo de papel seco. Retire el exceso de polvo antes de aplicar la barrera cutánea o cualquier otro producto.

Por favor lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Con casi 50 años de participación activa en el cuidado de la ostomía, apoyamos a las personas con ostomías, al suministrarles sistemas y accesorios, fáciles de manejar y garantizando servicios personalizados dentro de un enfoque holístico.



## En Chile contamos con un programa gratuito de pacientes:

**Siempre a Tu Lado:** Brinda asesoría continua tanto a los pacientes ostomizados, como a sus familiares, profesionales y cuidadores, en forma presencial y online. Entregamos conocimientos necesarios para la gestión integral de su ostomía. Adicionalmente identificamos el sistema que se adapta a sus requerimientos y con entrega de kit de ostomía.



Para compras, visite: [www.tiendabbraun.cl](http://www.tiendabbraun.cl)

<https://programasiempreatulado.com/>

[contacto@programasiempreatulado.com](mailto:contacto@programasiempreatulado.com)

**Horario de atención:**

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

+56 9 8701 4209 (Centro de Llamados y WhatsApp)

+56 9 4492 3095 (Santiago)

+56 9 7646 5472 (Sur Extremo)



B. Braun Medical Spa

División Avitum WOC | Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana | Chile

Tel. 2 2440 7100 | [www.bbraun.cl](http://www.bbraun.cl)